


Instruções de Coleta

Passo a passo da coleta

1. Coletar

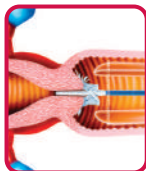

2. Destacar



3. Enviar



100% das células coletadas são transferidas para o frasco.

Meio Líquido e Escovas BD SurePath™



- Solução a base de etanol

- Preservação da amostra:

- 1 mês em temperatura ambiente
- 6 meses refrigerado (2°C a 8°C)



- Rovers® Cervex-Brush® Combi

Não deve ser usada em
pacientes grávidas




- Rovers® Cervex-Brush®

Pode ser usada em pacientes grávidas
até a 10ª semana de gestação




Ajudando as
pessoas a viverem
vidas saudáveis

Coleta Rovers® Cervex-Brush® Combi

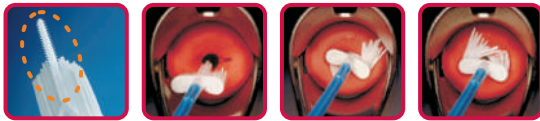

- Posicionar as cerdas mais longas da Rovers® Cervex-Brush® Combi no canal endocervical.
- As cerdas laterais irão se espalhar sobre a ectocérvice e as centrais irão penetrar no canal endocervical.
- Mantendo uma pressão suave, girar a Rovers® Cervex-Brush® Combi **duas vezes (2x) no sentido horário**. ↻
- Destacar a cabeça da escova no frasco BD SurePath™, colocar a tampa e enviar ao laboratório.

Coleta Rovers® Cervex-Brush®

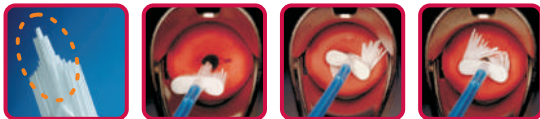

- Posicionar as cerdas mais longas da Rovers® Cervex-Brush® no canal endocervical.
- As cerdas laterais irão se espalhar sobre a ectocérvice e as centrais irão penetrar mais suavemente no canal endocervical.
- Mantendo uma pressão suave, girar a Rovers® Cervex-Brush® **cinco vezes (5x) no sentido horário**. ↻
- Destacar a cabeça da escova no frasco BD SurePath™, colocar a tampa e enviar ao laboratório.

BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company, © 2010

BD Escovas para Coleta Endocervical: Registro ANVISA nº 10033430561
Família SurePath Preservative - Becton Dickinson: Registro ANVISA nº 10033430537

BD Diagnostics
Diagnostic Systems
CRC BD: 0800 055 5654
www.bd.com.br